


Avant le début d'une session d'accès veineux, aspirez et jeter la solution instillée dans le dispositif d'accès vasculaire (DAV) au cours de la session précédente conformément au protocole de l'établissement.

À la fin de chaque session d'accès veineux, rincer les voies du DAV avec une solution stérile de chlorure de sodium 0,9% USP pour éliminer tout sang, médicament ou autre substance restant dans le DAV.


Directives d'utilisation

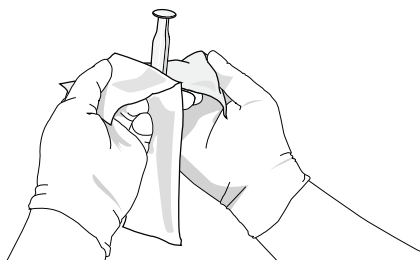


- 1** Ouvrir aseptiquement l'emballage de la seringue préremplie CitraFlow™ *. Avant chaque utilisation, inspecter visuellement le contenu de chaque seringue préremplie pour en vérifier la clarté, les particules en suspension, le précipité, la décoloration et les fuites. Ne pas utiliser si l'une des particularité mentionné ci-dessus est observée.



- 2** Retirer et jeter le bouchon de la seringue.

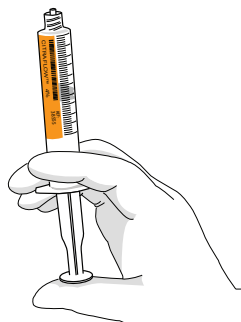

- 3** Expulser l'air de la seringue. Ne pas laisser d'air piégé dans le circuit de fluide. Connecter la seringue au DAV. Utiliser uniquement avec des connecteurs compatibles Luer Lock.

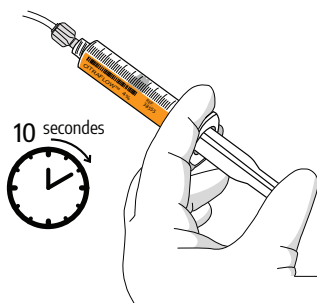

- 4** Lentement, sur une période de 10 secondes, injecter le volume d'amorçage de la solution CitraFlow™ dans chaque voie du DAV, en tant qu'agent de verrouillage, selon le volume correspondant à la capacité luminale spécifiée par le fabricant de DAV.



- 5** Retirer et jeter la solution inutilisée et les seringues vides conformément à la politique relative aux déchets biologiques dangereux de l'établissement.

* Les produits CitraFlow™ sont compatibles avec les champs stériles.