


Antes de iniciar una sesión de acceso venoso, aspire y deseche la solución instilada en el dispositivo de acceso vascular (DAV) durante la sesión anterior de acuerdo con el protocolo de la instalación.

Al final de cada sesión de acceso venoso, lave la DAV con una solución estéril de cloruro de sodio al 0.9% para eliminar la sangre, el fármaco u otra sustancia que quede en el DAV.

## Instrucciones de uso

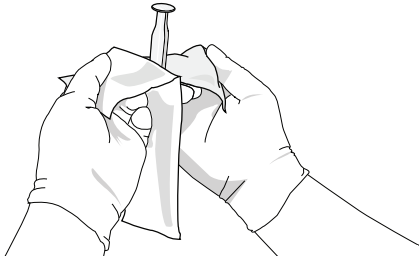


**1**

Abra asépticamente el paquete de la jeringa precargada de CitraFlow™ \*. Antes de cada uso, inspeccione visualmente el contenido de cada jeringa precargada en busca de claridad, de partículas suspendidas, precipitados, decoloración y fugas. No utilice si se observa alguno de los efectos anteriores.




**2**

Retire y deseche la tapa de la jeringa.

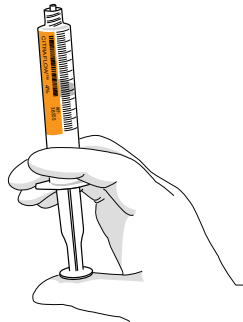

**3**

Expulsa el aire de la jeringa. No permita que el aire quede atrapado en el circuito del fluido. Conecte la jeringa a la DAV. Use solo con conectores compatibles con Luer Lock.

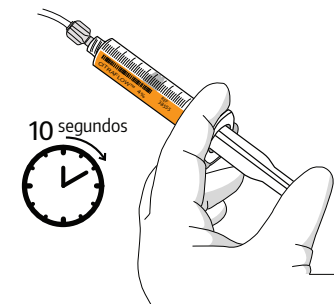

**4**

Poco a poco, durante un período de 10 segundos, inyecte el volumen de arranque de la solución CitraFlow™ en cada canal del DAV, como agente de bloqueo, en volúmenes correspondientes a la capacidad de luz especificada por el fabricante del DAV.



**5**

Retire y deseche las porciones no utilizadas y vacíe las jeringas de acuerdo con la política de residuos de riesgo biológico de la instalación.

\* Los productos CitraFlow™ son compatibles con campos estériles.